

Paramètres	Stabilité à 2-8°C	Paramètres	Stabilité à 2-8°C
Ac HAV IgM (sérum SST)	24h	K (sérum SST)	24h
Ac HAV totaux (sérum SST)	24h	K (plasma-hép. sans gel séparateur)	6h
AcHBC (sérum SST)	24h	LDH (sérum SST)	24h
AcHBS (sérum SST)	24h	Lipase (sérum SST)	24h
AcHCV (sérum SST)	24h	Magnésium (sérum SST) *	6h
Ac HIV (sérum SST)	24h	Na (plasma-hépariné)	24h
ACE (sérum SST)	24h	Na (sérum SST)	24h
Acide Urique (sérum SST)	24h	NT-proBNP (sérum SST)	24h
AFP (sérum SST)	24h	Phosphatase Alcaline (sérum SST)	24h
AgHBS (sérum SST)	24h	Phosphore (sérum SST)	24h
Albumine (sérum SST)	24h	Progestérone (sérum SST)	24h
Amylase	24h	Prolactine (sérum SST)	24h
Apolipoprotéine A1 (sérum SST)	24h	Protéines Totales (sérum SST)	24h
Bicarbonates (sérum SST) *	2h	PSA libre (sérum SST)	24h
Bilirubine Conjuguée (sérum SST) *	6h	PSA total (sérum SST)	24h
Bilirubine Totale (sérum SST) *	6h	Rubéole IgG (sérum SST)	24h
CA 125 (sérum SST)	24h	T3L (sérum SST)	24h
CA 15.3 (sérum SST)	24h	T4L (sérum SST)	24h
CA 19.9 (sérum SST)	24h	Testostérone (sérum SST)	24h
Calcium (sérum SST)	24h	Toxoplasmose IgG (sérum SST)	24h
Cholestérol Total (sérum SST)	24h	Toxoplasmose IgM (sérum SST)	24h
Cholestérol HDL (sérum SST)	24h	Transferrine (sérum SST)	24h
Cl (plasma-hépariné)	24h	Triglycérides (sérum SST)	24h
Cl (sérum SST)	24h	TSH (sérum SST)	24h
CMV IgG (sérum SST)	24h	Urée (sérum SST)	24h
CMV IgM (sérum SST)	24h	Vit D3 25 OH (sérum SST)	24h

Paramètres	Stabilité à 2-8°C	Paramètres	Stabilité à 2-8°C
Cortisol (sérum SST)	24h		
Créatine Kinase (sérum SST)	24h		
Créatinine (sérum SST)	24h		
CRP (sérum SST)	24h		
Estradiol (sérum SST)	24h		
Fer (sérum SST)	24h		
Ferritine (sérum SST)	24h		
GGT (sérum SST)	24h		
Glucose (plasma-fluoré)	24h		
Glucose (sérum SST)	24h		
GOT (sérum SST) *	6h		
GPT (sérum SST)	24h		